

8 de septiembre de 2020



Laboratorios Participantes
Programa de Proficiencia

Programa de Proficiencia
Laboratorio de Salud Pública
De Puerto Rico

INSTRUCCIONES PARA LA PROFICIENCIA DE SEPTIEMBRE 2020

Se incluyen las siguientes muestras según apliquen:

- A. Muestras **2020- 611, 612, 613, 614 y 615** – Proficiencia de Gram Stain.
- B. Muestras **2020- 621, 622, 623, 624 y 625** – Proficiencia para determinación de Antígeno Directo para Estreptococo.
- C. Muestras **2020- 631, 632, 633, 634 y 635** – Proficiencia de Bacteriología – Cultivo y Sens.
- D. Muestras **2020- 701, 702, 703, 704 y 705** - Proficiencia de Parasitología.
- E. Muestras **2020- 711, 712, 713, 714 y 715** – Proficiencia de Serología de Sífilis.
- F. Muestras **2020- 721, 722, 723, 724 y 725** – Proficiencia de Rubella.
- G. Muestras **2020- 731, 732, 733, 734 y 735** – Proficiencia para ANA.
- H. Muestras **2020- 741, 742, 743, 744 y 745** – Proficiencia para Inmunología General (RA-MONO-ASOT-CRP)
- I. Muestras **2020- 751, 752, 753, 754 y 755** – Proficiencia para Inmunología Especial I (C3, C4, IgA, IgG e IgM)
- J. Muestras **2020- 761, 762, 763, 764 y 765** – Proficiencia para Inmunología Especial II (Alpha-fetoprotein e IgE)
- K. Muestras **2020- 771, 772, 773, 774 y 775** – Proficiencia para Helicobacter pylori.
- L. Muestras **2020- 641, 642, 643, 644 y 645** - Proficiencia para Influenza A & B.
- M. Muestras **2020- 791, 792, 793, 794 y 795** – Proficiencias para Mycoplasma

Instrucciones:

1. Condiciones de almacenamiento:
 - a. Mantener envases cerrados y refrigerados (2-8°C) hasta el momento de usarse.
 - b. Protegerlos de la luz.

Proficiencia para Tinción Gram

1. Favor de teñir laminillas incluidas con tinción Gram y escoger código de resultados incluidos en hojas de reporte.

Proficiencia de Antígeno Directo para Estreptococo

1. Procese estas muestras de proficiencia de acuerdo al método utilizado y siguiendo las instrucciones del fabricante del "kit" de prueba. Deben ser procesadas en condiciones idénticas a la muestra clínica (hisopo "swab" de garganta).
2. Almacene de 4-8°C (nevera). Al analizar deben estar a temperatura de salón. Saque el hisopo del bolso de aluminio y analice en igualdad de condiciones que el paciente.

Proficiencia para Bacteriología:

1. **NOTA: A tenor con lo establecido en CLIA, CMS ha indicado que no es correcto que un laboratorio decida si participar o no en un evento basado en los criterios de reporte establecidos por el Programa. El laboratorio participante no determina cómo participa en el evento en el que está matriculado, esto es responsabilidad exclusivamente del Programa de Proficiencia.**
2. El diagnóstico clínico y la información de origen y edad son suministrados para simular una situación clínica y permitir al tecnólogo médico seleccionar los medios apropiados y los métodos para procesar estas muestras. **Para todas las muestras enviadas favor de sembrar en los medios disponibles en su laboratorio antes de contestar que su laboratorio no procesa ese tipo de cultivo.**
3. Para la identificación bacteriana debe procesar las muestras siguiendo las instrucciones de manejo a continuación:
 - a. Antes de abrir el empaque de KWIK-STIK permita que este llegue a equilibrarse a temperatura ambiente. Luego abra el empaque y remueva la muestra.
 - b. Despegue el sello de identificación con cuidado para que no se desprenda el dispositivo, adhiéralo a la placa de cultivo primaria a utilizar para la identificación.
 - c. Apriete (una sola vez) la ampulla en la parte superior de la muestra (justo debajo del menisco del fluido de la ampulla) que se encuentra en la tapa, para así soltar el líquido de hidratación.
 - d. Sujete la muestra en posición vertical y de golpecitos sobre una superficie dura para así facilitar el flujo del líquido hacia la parte baja de la unidad que contiene la

bolita (pellet). Permita que el líquido de hidratación fluya a través del hisopo hacia la porción baja de la unidad que contiene la bolita (pellet).

- e. Oprimiendo la porción baja de la unidad, triture la bolita (pellet) en el líquido hasta que la suspensión esté homogénea.
- f. Inmediatamente sature el hisopo con el material hidratado y trasfiere a un medio de cultivo.
- g. Inocule la placa de cultivo suavemente rodando el hisopo sobre una tercera parte de la placa.
- h. Utilizando un asa de inocular (loop) estéril proceda a realizar un estriado para facilitar el aislamiento de la colonia.
- i. Descarte la muestra KWIK-STIK en el lugar de desperdicio de riesgo biológico (biohazard) correspondiente.
- j. Inmediatamente incube la placa o placas primarias a las temperaturas y condiciones apropiadas para el microorganismo.

BACTERIOLOGÍA: (Datos sobre los desconocidos e informe requeridos)

Numero de muestra	Sexo	Edad	Historial Clínico	Origen o Fuente
2020-631	M	10	Paciente con faringitis	Garganta
2020-632	M	55	Paciente con quemaduras de piel	Herida
2020-633	F	35	Paciente con disuria	Orina
2020-634	F	44	Infección del tracto urinario	Orina
2020-635	F	26	Paciente con cistitis	Orina

Análisis requerido:

2020-631 – Identifique patógenos principales.

2020-632 – Identifique todos los patógenos presentes.

2020-633 – Identifique todos los organismos patógenos presentes.

2020-634 – Identifique el organismo presente y haga prueba de sensibilidad a antibióticos.

2020-635 – Identifique el organismo presente y haga prueba de sensibilidad a antibióticos.

Proficiencia de Parasitología:

Las muestras **2020-701, 702 y 704** son una suspensión fecal en 10% de formalina. No es necesaria la técnica de concentración.

Favor de realizar el siguiente procedimiento en estas muestras:

1. Mezcle el contenido del vial cuidadosamente, invirtiéndolo 10 veces.
2. Remueva la tapa del vial.
3. Prepare para observación directa (wet mount)
4. Examine como una muestra de paciente.

Nota: Almacenar a temperatura ambiente, estable por 12 meses.

Muestra **2020-703:** laminilla para “**Trichrome Stain**”.

Muestra **2020-705:** foto reproducida

1. Identifique el parásito presente.

Proficiencia para Sífilis, Antinuclear factor (ANA), Rubella, y RA- MONO-ASOT-CRP

Son muestras de origen humano. Trátese como paciente y al analizarla tome las debidas precauciones.

Proficiencia para Inmunología Especial I - Para Alpha 1 – Antitrypsin, C3, C4, IgA, IgG e IgM

a. Las muestras que incluimos son muestras líquidas. Favor de seguir las siguientes instrucciones:

1. Mezcle completamente el contenido del frasco antes de cada uso, invirtiendo suavemente el envase durante varios minutos.
2. Destape el frasco y transfiera la cantidad requerida por su equipo a un recipiente de muestra limpio.
3. Tape el frasco inmediatamente y colóquelo en el refrigerador a temperatura de 2-8°C **NO LOS CONGELE.**

La estabilidad del producto una vez esté abierto es de 30 días siempre que se mantengan firmemente cerrados a una temperatura de 2-8°C. La contaminación bacteriológica produce un aumento en la turbidez y/o un olor característico. Deseche el frasco si observa evidencia de contaminación microbiana.

Proficiencia para Inmunología Especial II - Para Alpha fetoproteina e IgE:

1. Reconstituya las muestras con 5ml de **agua deionizada**. El agua debe estar a temperatura de salón (22-28°C). Deje el material reconstituido en reposo por 10 minutos a temperatura de salón, luego mezcle suavemente hasta que esté completamente disuelto.
 2. No utilice hasta que esté completamente reconstituido.
- 1 Favor almacenar las proficiencias en nevera (2-8°C) tan pronto se reciban para mantener una estabilidad de **90 días sin abrir**. Luego de abiertos los envases son estables por **30 días** si se mantienen bien tapados y almacenados, sin contaminación microbiana.

Proficiencia para H. Pylori

Son muestras de origen humano. Trátese como paciente y al analizarla tome las debidas precauciones.

Proficiencia para detección de Influenza A & B

Las Proficiencias de Influenza deben ser trabajadas de acuerdo a las especificaciones del kit que utilicen en su laboratorio. Si el kit no tiene instrucciones de cómo trabajar Proficiencias, la recomendación del suplidor son que las trabajen como un lavado o aspirado nasal o nasofaríngeal. El reporte de las mismas deben realizarlo como aparece en el siguiente diagrama. Recuerde reportar tanto la Influenza A como la Influenza B. De tener alguna duda o pregunta pueden comunicarse al programa.

Survey #: 1			
Test: 176		Influenza A & B Qualitative Rapid Test	
Sample ID: 2016-641			
TST	REA	RES	
1 - INFLU. A	2 - SA Scienti	1 - NEGATIVE	Edit Del
2 - INFLU. B	2 - SA Scienti	2 - POSITIVE	Edit Del
			Add
Sample ID: 2016-642			
TST	REA	RES	
			Add

Reporte de resultados

1. Los códigos a utilizar son los que se encuentran en PTNET. En caso de no encontrar el que usted ~~necesite, favor de comunicarse al programa para que el mismo sea añadido en el sistema.~~
2. La hoja de identificación de parásito debe ser accesada en la página principal de PTNET.
3. **El laboratorio debe reportar los resultados al Programa por PTNET. Es responsabilidad del laboratorio obtener y guardar la hoja de confirmación donde aparece la fecha y hora en que fueron sometidos los resultados.** Esta es la hoja que usted debe presentar como evidencia en caso de que ocurra algún problema, recuerde que **sin esta hoja NO se considerará ninguna alegación** por parte del laboratorio.
4. **La fecha límite para reportar los resultados es el 25 de septiembre de 2020 por PTNET.** No deben enviar **resultados en papel, ya que NO serán considerados.** De confrontar algún problema para reportar debe acudir a nuestra oficina y nosotros le proveeremos una computadora para que pueda realizar el reporte de sus resultados.
5. Recuerde, resultados enviados en papel o que NO hayan sido sometidos en o antes de la fecha límite, NO serán considerados para evaluación. Serán evaluados como NO SATISFACTORIO (0%) de acuerdo con la Reglamentación Federal de 28 defebrero de 1992.Es responsabilidad del Laboratorio que estos resultados sean sometidos a tiempo. No nos hacemos responsables por problemas con su internet. Agradeceremos tomen las debidas precauciones al respecto.
6. Si las muestras de Proficiencia no son recibidas dentro de los primeros 3 días desde la fecha de envío, si llegan en malas condiciones, incompletas, incorrectas o rotas; Favor de comunicarse al Programa de Proficiencia para tomar las acciones correctivas correspondientes. Pasado el día viernes de la semana en que sale el embarque (**11 de septiembre de 2020**) el Programa de Proficiencia no se responsabiliza por situación relacionada con el embarque que no haya sido oportunamente reclamada por el laboratorio participante. Para evitar contratiempos, le sugerimos cotejar las proficiencias tan pronto las reciban. Cualquier situación, reclamación o duda sobre el embarque debe ser notificada al Programa vía teléfono o correo electrónico, **NO por FAX.**
7. Todos los desconocidos deben ser reportados en las unidades requeridas. Es responsabilidad del laboratorio convertir los resultados obtenidos a las unidades solicitadas.
8. **RECUERDE, errores clericales no son considerados.**

Los teléfonos a comunicarse con el Programa de Proficiencia son:

**Directo (787) 765-2929 ext. 3770, 3767,3736 y 3751
Fax. 787-274-770**